

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛКОТЕКТОР»

Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д 5-7,
телефон/факс (812) 320-22-97
ИНН 7842365421 КПП 784201001



Исх. № 105 от 18.04.2018

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

[О внесении поправки в документ «Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Руководство по эксплуатации», 2013 г. с изм. №1,2]

Настоящим уведомляем о внесении поправки в документ «Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Руководство по эксплуатации», 2013 г. с изм. №1,2, зарегистрированный в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 54185-13 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5423). Ошибка была допущена при издании документа. Ниже приведен текст поправки.

Поправка № 1 к документу: «Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Руководство по эксплуатации», 2013 г. с изм. № 1,2

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Введение. 3 страница, первый абзац снизу	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V (с принадлежностями) зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (регистрационное удостоверение ФС № 2006/1967 от 11 декабря 2006 г., срок действия до 11 декабря 2016 г.), внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники и разрешены к применению на территории РФ.	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V (с принадлежностями) зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и допущены к обращению на территории РФ, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5423 от 01 марта 2017 года с неограниченным сроком действия.
Раздел 2. Пункт 2.7	Перед проведением измерения убедитесь, что соблюдены условия, перечисленные в Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего РЭ, выполните подготовку анализатора к работе согласно 2.6 настоящего РЭ, ознакомьте обследуемого с порядком проведения измерения, а также правилами выполнения выдоха (в соответствии с указаниями, приведенными в 2.7.7 настоящего РЭ).	Перед проведением измерения убедитесь, что соблюдены условия, перечисленные в 2.1 настоящего РЭ, выполните подготовку анализатора к работе согласно 2.6 настоящего РЭ, ознакомьте обследуемого с порядком проведения измерения, а также правилами выполнения выдоха (в соответствии с указаниями, приведенными в 2.7.7 настоящего РЭ).
Раздел 2. Пункт 2.7.11	Удалите использованный мундштук, утилизируйте его в соответствии с указаниями Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего РЭ.	Удалите использованный мундштук, утилизируйте его в соответствии с указаниями 4.3 настоящего РЭ.
Раздел 2. Пункт 2.7.12	Для проведения следующего измерения нажмите виртуальную кнопку  и повторите процедуру согласно 2.7.2 ÷ Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего РЭ.	Для проведения следующего измерения нажмите виртуальную кнопку  и повторите процедуру согласно 2.7.2÷2.7.11 настоящего РЭ.
Раздел 2. Пункт 2.7.17 Стр. 30 второй абзац сверху	Для продолжения работы следуйте указаниям Ошибка! Источник ссылки не найден. ÷2.7.14 настоящего РЭ.	Для продолжения работы следуйте указаниям 2.7.11÷2.7.14 настоящего РЭ.
Раздел 2. Пункт 2.10	Перед проведением измерения убедитесь, что соблюдены условия, перечисленные в Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего РЭ, выполните подготовку анализатора к работе согласно 2.6 настоящего РЭ, ознакомьте обследуемого с порядком проведения измерения, а также правилами выполнения выдоха (в соответствии с указаниями, приведенными в 2.10.4 настоящего РЭ).	Перед проведением измерения убедитесь, что соблюдены условия, перечисленные в 2.1 настоящего РЭ, выполните подготовку анализатора к работе согласно 2.6 настоящего РЭ, ознакомьте обследуемого с порядком проведения измерения, а также правилами выполнения выдоха (в соответствии с указаниями, приведенными в 2.10.4 настоящего РЭ).

Раздел 3. Пункт 3.1.4.2 Стр. 40 четвер- тый абзац свер- ху	ВНИМАНИЕ! Мундштуки дезинфекции не подвер- гаются, а утилизируются после применения со- гласно Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего РЭ.	ВНИМАНИЕ! Мундштуки дезинфекции не подверга- ются, а утилизируются после применения согласно 4.3 настоящего РЭ.
--	--	--

Генеральный директор

Исп. Т.Н. Горякина
Нач.отд. метрологии
(812) 320-22-96, доб. 221

А. С. Сидоров

